

Mise à jour ORCAM Read (décembre 2023)



LA MISE À JOUR DE L' ORCAM READ DE SEPTEMBRE 2023 SIMPLIFIE L'UTILISATION DU STYLO DE LECTURE ORCAM EN APPORTANT EN PLUS LA LECTURE INTUITIVE AU DOIGT.

Posez l'ORCAM Read sur son support, placez un document sur le bureau et pointez simplement avec votre doigt l'article que vous souhaitez lire.

La mise à jour de votre Orcam Read Smart comporte:

- La mise à jour logicielle de votre Orcam, en date d'octobre 2023
 - 2 nouvelles voix plus humaines et chaleureuses
 - la lecture intelligente sur support, avec pointage du doigt du texte
 - l'amélioration de la reconnaissance
 - La lecture de page A4
- Le support de lecture pour ORCAM, léger, discret
- Un câble de charge avec embout magnétique de 2 mètres : plus simple à connecter , plus long pour l'ergonomie
- Un manuel d'utilisation de cette toute nouvelle fonctionnalité de lecture sur le support.
- Une assistance téléphonique

Mise à jour ORCAM Read (décembre 2023)



Avec la mise à jour d'octobre 2023 de l' ORCAM read, profitez d'une machine à lire multi usage, intuitive et simple. Elle est parfaitement adaptée aux personnes âgées souffrants de DMLA.

Vous bénéficiez de la rapidité de reconnaissance et de la lecture de qualité de l'ORCAM READ Smart. A cela s'ajoute le confort du support de lecture permettant ainsi l'utilisation sans tenir l'ORCAM à la main.

la mise à jour transforme la façon de lire

Tenu à la main, ORCAM READ Smart vous permet de lire, comme d'habitude, des paragraphes d'articles de revue, des pages de livres ainsi que des notices et boites de médicaments.

Posé en haut du support de lecture, l' ORCAM READ se transforme alors en réelle machine à lire de bureau.

La lecture de page entière de magazine est alors aisée en lui demandant par un simple "ORCAM lit tout".

Grâce à la reconnaissance de mouvement, **ORCAM détecte votre doigt** qui pointe un paragraphe et commence alors la lecture de ce dernier. De plus , d'un simple geste de votre main ouverte au dessus du document, la lecture s'arrête.

Vous découvrez ainsi une nouvelle façon de lire, plus intuitive, plus simple, plus efficace.

Le support de lecture de l' ORCAM

Avec ce support de lecture, l'ORCAM READ Smart devient une machine à lire de bureau ultra simple d'utilisation.

Ce support, léger, stable et discret se transporte aisément si besoin de pièce en pièce.

A l'extrémité supérieur du bras du support de lecture, l'ORCAM se glisse dans un petit



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Mise à jour ORCAM Read (décembre 2023)

support et est alors dirigé vers le bas, en regard du document à lire.

Le document est simplement positionné entre les pieds de la base du support, devant l'utilisateur. La lecture peut alors commencer.

La lecture intuitive

Commencez à lire tout de suite en utilisant votre doigt.

En effet, en **désignant avec votre doigt le texte à lire**, puis en retirant votre main de dessus du document, ORCAM lit alors le paragraphe montré. La lecture continue jusqu'à la fin du texte ou si vous avancez votre main ouverte au dessus du document, stoppant alors la lecture.

Dites "Orcam lit tout" et la lecture de l'ensemble du document commence. Ainsi les deux pages d'un roman, un courrier sur une page A4, une page de magazine, sont lues en commençant en par le texte situé en haut à gauche. Ensuite l'intelligence artificielle d' ORCAM enchaîne les paragraphes dans le meilleur ordre possible.

Une écoute claire pour tous

Cette mise à jour inclue **2 nouvelles voix aux sonorité plus chaleureuses et plus humaines** encores.

Le son est transmis naturellement via le **haut-parleur intégré** à l' ORCAM.

Les deux boutons en relief, **Plus et Moins** sur le devant de l'ORCAM permettent l'ajustement du volume sonore. Ce dernier peut également être ajusté par de simple **commandes vocales comme "augmente le volume" ou "diminue le volume"**.

Pour les **personnes équipées d'appareils auditifs**, après appairage en bluetooth avec l'ORCAM, le son est alors transmis directement aux oreilles. Le haut parleur intégré à l'ORCAM restant alors muet.

Contenu de la mise à jour de l' ORCAM

- Mise à jour effectuée dans nos locaux
- Un support de lecture Orcam
- Un câble de charge, magnétique et d'une longueur de 2 m
- Un manuel d'utilisation dédié à ce nouveau mode de lecture
- Une assistance téléphonique



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Mise à jour ORCAM Read (décembre 2023)



Orcam Read Smart :

Mise à jour de Septembre 2023

Support pour l'ORCAM Read:

Dimension en utilisation : Base de 25 cm x 24 cm, Hauteur : 45 cm

Poids : 580 g

- Lecture intelligente simplement en pointant du doigt le texte à lire.
- Lecture d'une page en entier en disant " Orcam lit tout" . Contrairement à tous les autres appareils où vous devez numériser mot à mot, OrCam Read capture une page entière en une seule fois.
- Commande par la voix pour les fonctions principales.
- L'ORCAM READ reste utilisable seul , tenu à la main, en pointant et cliquant simplement. D'une simple pression sur un bouton, OrCam Read active un laser pour indiquer où commencer la lecture sur n'importe quel texte ou écran imprimé.