


# Souris Vidéo Loupe



LOUPE ÉLECTRONIQUE MANIABLE QUI SE CONNECTE SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION ET LES ÉCRANS INFORMATIQUES

**Une souris vidéo loupe électronique très maniable, simple, pratique, pour une utilisation à la maison lors de lecture de magazines, journaux dans le cas de DMLA.**

- Simple d'utilisation et grossissements de 15x à 50x sur un écran de 50 cm.
- Posée sur le document et déplacée facilement comme une souris.
- La loupe se connecte sur téléviseur ou écran informatique ( avec option Hdmi )

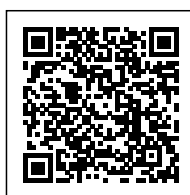

La souris vidéo loupe permet de consulter tous les documents, grossis , affichés sur l'écran du téléviseur.

Elle est très pratique pour tout malvoyant avec une basse vision de type DMLA. La loupe est simple d'utilisation et apporte la fonctionnalité de téléagrandisseur à un téléviseur standard.

Avec l'**option HDMI**, le vidéo loupe se connecte sur **tout écran avec une entrée Hdmi**.

## **La souris vidéo loupe, une vraie loupe électronique**

La souris loupe électronique permet de consulter un programme Télé, un article de magazine ou de journal, une notice de médicament. L'affichage a lieu sur le téléviseur

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Souris Vidéo Loupe

domestique ce qui évite d'acheter un agrandisseur avec un écran spécifique. La connexion se fait via la prise Jaune (cinch), entrée video du coté du téléviseur. Dans le cas d'un écran compatible Hdmi ( téléviseur ou écran informatique), la connexion s'effectue via la prise HDMI ( avec option Hdmi choisie)

Cette vidéo loupe possède toutes les fonctions principales des loupes électroniques.

- Les grossissements des textes et images vont de 15x à 50x sur un téléviseur de 50cm.
- L'utilisateur choisi le mode d'affichage sur l'écran. Soit en couleurs naturelles, soit en fort contraste avec deux possibilités, Noir /Blanc ou Blanc / Noir. Ce dernier mode est le plus apprécié des personnes souffrant de DMLA par exemple.
- Le gel de l'image par le bouton situé le plus à droite est également une des fonctions de cette loupe .

De plus la Souris vidéo loupe permet d'utiliser le grand écran du téléviseur. C'est un gain de place et la possibilité d'obtenir de très fort grossissements.

## Ergonomique et accessible à tous malvoyant

- La caméra a la forme d'une grosse souris dont la forme ergonomique permet de la tenir facilement. Sa prise en main est aisée pour tous les utilisateurs.
- Les 4 boutons sont facilement repérables et sont positionnés directement sous les doigts. Le bouton marche/arrêt se situe sous le pouce, tandis que le zoom et le choix du mode de couleur se trouvent sous l'index et le majeur.
- Le suivi d'une ligne de texte est facilité par les 4 petites roulettes situées sous la souris loupe. Le déplacement horizontal est alors privilégié par rapport au déplacement vertical.



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Souris Vidéo Loupe

## CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURIS VIDEO LOUPE

- Grossissement de 15 x à 60 x sur un écran de 50 cm (20 " de diagonale) .
- Largeur maximum de texte vu par la caméra: 24 mm
- 3 modes d'affichage: couleurs réelles, fort contraste caractères Noir / fond Blanc et inverse
- Fonction de gel d'image
- Connexion sur les écrans et téléviseurs possédant une entrée vidéo de type Cinch (la prise est jaune)
- Connexion en HDMI sur un écran externe indépendant (pas sur un ordinateur portable) avec l'option adaptateur HDMI.
- Dimension : 6 x 12 x 6,4 cm
- Poids : 127 g
- Alimentation sur secteur par le bloc alimentation fourni (220V – 240 V)

## LES POINTS FORTS DE LA SOURIS VIDEO LOUPE

- Simple d'utilisation chez soi en connectant la souris loupe sur le téléviseur.
- Apprécié par les seniors atteints de DMLA

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

