

UNE LUNETTE LOUPE FRONTALE MAINS LIBRES ÉCLAIRANTE ET UNE GRANDE LOUPE À MAIN ÉCLAIRANTE.

LE DUO ALLIÉ DES PERSONNES MALVOYANTES POUR UNE VISION PRÉCISE

Travaux de précision, lecture ou loisirs créatifs, ces 2 loupes vous permettent de tout voir tout un peu plus gros..

Pratiques pour les malvoyants et les personnes atteintes de DMLA, elles offrent un confort visuel optimal grâce aux grossissements variés et leurs éclairages LED intégrés.

Loupe frontale Pénélope, avec sa batterie rechargeable et sa sacoche de protection et de rangement en tissu renforcé.



# Une aide précieuse pour les activités du quotidien

Que ce soit pour lire des petites lettres, réaliser des travaux de précision ou pratiquer vos loisirs créatifs, ces loupes éclairantes à LED sont tèrs appréciées par les personnes souffrant de basse vision légère, de faible DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) ou simplement ayant besoin d'un grossissement d'appoint.

Pratiques et ergonomiques, ces loupe offrent une vision nette, grossie et un confort visuel amélioré.



Vidéos et produits Basse Vision 01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

## Les avantages de la lunette loupe frontale

- Éclairage LED intégré : éclaire uniformément votre champ de vision, idéal pour les environnements à faible luminosité.
- **Grossissements interchangeables**: choisissez parmi 5 niveaux (1x, 1,5x, 2x, 2,5x, 3,5x) pour une vision adaptée à vos besoins.
- Mains libres: optez pour les branches classiques ou le bandeau élastique, selon vos préférences.
- Rechargeable via USB : utilisez la batterie intégrée pour une autonomie durable, sans besoin de piles.
- Accessoires inclus : livré avec une sacoche de protection et de rangement robuste en tissu pour protéger vos lunettes lorsque vous ne les utilisez pas.
- **Polyvalence** dans les usages : couture, modélisme, numismatique, peinture, dessin, lecture de notices de médicaments, d'étiquettes alimentaires, ou de courrier.

## Les avantages de la loupe à main Simone

- **Poignée pratique** qui assure une prise en main confortable, vous permettant de l'utiliser longtemps sans fatigue.
- Adaptées à divers usages : lecture, couture, peinture, bricolage fin ou encore lecture de notices de médicaments.
- L'éclairage LED intégré avec trois niveaux d'intensité pour augmenter le contraste des textes.
- Une **grande lentille** de 65 mm x 110 mm avec un grossissement de 2x, idéale pour la lecture de documents ou de journaux.
- Une **petite lentille** de 25 mm offre un grossissement de 6x, idéale pour les détails plus fins.

# Améliorez votre quotidien avec ces loupes LED pratiques et polyvalentes

Ne laissez plus la basse vision ou la DMLA limiter vos activités. Avec ce duo de loupes, profitez d'une vision agrandie, d'un éclairage optimal et d'une grande autonomie pour vos tâches quotidiennes et vos loisirs créatifs.



Vidéos et produits Basse Vision 01 69 19 14 60 - info@visiole.fr







## CARACTÉRISTIQUES DE LA LUNETTE LOUPE FRONTALE ÉCLAIRANTE PENELOPE

- 5 lentilles possibles de 95 mm x 34 mm
  - Grossissement: 1x, 1,5x, 2x, 2,5x, 3,5x
  - Distances de travail correspondantes : 555 mm, 380 mm, 280 mm, 180 mm, 160 mm
- · Lentilles traitées pour plus de dureté
- Eclairage par 2 LED, orientables verticalement, 2 niveaux de puissance.
- Batterie rechargeable intégrée
- Recharge via le câble fourni USB Micro USB A, et alimentation 5V USB
- Très légères : 75 g

# CARACTÉRISTIQUES DE LA LOUPE À MAIN SIMONE

- Grande lentille rectangulaire de 11 cm x 6,5cm, grossissement de 2X (4 Dioptries)
- Petite lentille ronde de 25 mm, grossissement 6X (20 Dioptries)
- Hauteur d'utilisation optimale :
  - ∘ avec grossissement 2x : 25 cm
  - avec grossissement 6X : 5 cm
- Eclairage avec 50 led répartie autour de la loupe. 3 puissance d'éclairage par appui sur le bouton tactile de la poignée.
- Réglage de la luminosité : oui
- Poids : 190 g
- Alimentation par 3 piles AAA (non fournie)

## 1. Quels sont les niveaux de grossissement disponibles?



Vidéos et produits Basse Vision 01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Avec la loupe frontale vous pouvez choisir parmi 5 grossissements : 1x, 1,5x, 2x, 2,5x, et 3,5x. Chaque lentille est facilement interchangeable.

#### 2. L'éclairage LED peut-il être réglé?

Oui, l'éclairage LED est ajustable par un appui sur le bouton.

### 3. Les loupes sont-elle adaptée aux personnes atteintes de DMLA?

Absolument. Ces loupes sont idéale pour les personnes souffrant de légère basse vision ou de faible DMLA, grâce à ses fonctionnalités adaptées.

#### 4. Comment recharger la loupe Pénélope?

Elle est équipée d'un port USB pour une recharge facile et rapide, idéale pour un usage quotidien.

#### 5. Comment s'alimente la loupe Simone

3 piles AAA sont nécessaires et s'insèrent dans la poignée.

