

Lunettes Loupe FOCUS



LUNETTES LOUPES POUR LA LECTURE, LES TRAVAUX MANUELS, LA COUTURE, LA PHILATÉLIE...

Avec les lunettes loupes Focus, les petits travaux manuels, la consultations de boîtes de médicaments, notices, signatures, sont plus faciles avec ces loupes posées sur le nez, plutôt qu'avec une loupe tenue à la main.

- Grossissement modéré de X 2,5
- Réglage de dioptrie indépendant pour chaque œil
- Lunettes loupes légères



La Lunette Loupe Focus sont parfaites pour tous vos travaux manuels, coutures, bricolage, philatélie, peinture, etc.

Bien entendu, ces Lunettes conviennent parfaitement pour la lecture de livre ou la consultation de votre téléphone et montre.

Quand utiliser une lunette loupe ?

Lorsque la distance entre vous et le texte ou l'objet à regarder est de l'ordre de 20 - 30 cm.

Ainsi, la lecture, le bricolage, la couture, la peinture et les travaux de précisions constituent les domaines de prédilection de ces lunettes.

Ces lunettes loupes peuvent aussi être appréciées dans un bureau, en classe, en

Lunettes Loupe FOCUS

bibliothèque pour consulter des documents.

Principe des lunettes loupes

Une molette (blanche) placée sur chaque branche permet le **réglage de la dioptrie de -4 à +4**, indépendamment pour chaque œil. La seconde molette (noire), bloque le réglage.

Cette lunette loupe FOCUS sont généralement bien appréciées par les utilisateurs, après une période d'adaptation et de réglages de quelques heures.

Les lunettes loupe s'utilisent à la place des lunettes de vue, pour des personnes malvoyantes atteintes de maladie des yeux. A savoir que ces lunettes conviennent également pour des personnes avec une presbytie et désirant faire des travaux de précision.

Le confort visuel est apprécié et ces Lunettes Loupes Focus sont généralement bien supportées par les utilisateurs, après une période d'adaptation de quelques heures.

Une loupe sur le nez !

Les [lunettes loupes](#) ont l'avantage par rapport à des [loupes optique à main](#), d'être portées sur le nez. Les deux mains restent libres pour tenir un livre ou manipuler un objet.

Note : dans le cas de lunette de vue avec des corrections multiples ou spécifiques, le port des lunettes loupe peut ne pas convenir. Nous vous proposons alors de faire un essai pendant quelques jours .

D'autres [lunettes loupes](#) sont également proposées :

Pour regarder la télévision, les [LUNETTES LOUPE MAX TV](#) ou les [LUNETTES MAXI TV Plus](#) (distance supérieur à 2 m)

- Grossissement : environ 2,5 x
- Distance d'utilisation entre 25 et 45 cm
- Lentille en acrylique et monture en ABS
- Distance inter-pupillaire supportée de 60 à 68 mm
- Ajustage des dioptries ± 4 dioptries par un réglage indépendant droite et gauche,
- La correction des cylindres n'est pas possible.
- Fournie avec un étui rigide.
- Poids : 70 grammes



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Lunettes Loupe FOCUS

Les lunettes loupes FOCUS sont elles adaptées pour la lecture d'écrans d'ordinateur?

Oui , les lunettes peuvent être utilisées pour regarder un écran d'ordinateur si vous êtes assez proche.

En effet les lunettes loupes FOCUS proposent un grossissement 2X, et comme toute loupe optique nécessite d'avoir une distance entre les verres et l'écran de 25 cm dans ce cas.

A savoir: plus le grossissement optique est important , plus la distance sera réduite.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr