


Lunettes Loupe MAXI TV+



DES LUNETTES LOUPES POUR MIEUX VOIR LA TÉLÉVISION, LES FILMS, LE THÉÂTRE.

Lunettes loupe MAXI TV +, optimisées pour une accommodation entre 2 et 20 m: spectacle, cinéma, Télévision, musée, etc.

- Grossissement / facteur de rapprochement X 2,4
- Réglage indépendant de la dioptrie pour chaque oeil (de -1,5 à +6 Dpt)
- Montures légère et étui de protection fourni.

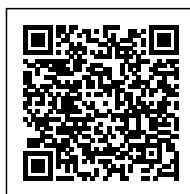

Les lunettes loupe MAXI TV+ vous rapprochent de la scène de théâtre, de concert ou de votre écran de télévision.

Vous voyez comme si vous étiez plus proche.

Les lunettes loupe MAXI TV+ en détail

Le système de double lentille grossit l'image indépendamment pour chaque oeil. Le facteur d'agrandissement ou de "rapprochement" est d'environ 2,4 X. En portant les lunettes loupe spectacle, la scène ou l'écran de cinéma vous semble 2,4 fois plus proche. Vous profitez pleinement de l'action ou du concert.

Positionné à plus de 2 mètres de l'écran ou de la scène, vous ajustez indépendamment la dioptrie pour chaque oeil. En effet, **ces lunettes se portent à la place des lunettes de vue**. Une molette située au bout de chaque branche, permet de régler la correction optique de **-1,5 à +6 Dioptrie** afin de compenser votre basse

Lunettes Loupe MAXI TV+

vision.

Le confort de vision augmente rapidement après avoir porté les lunettes pendant quelques minutes. Ces lunettes conviennent à un grand nombre de personnes avec un **léger besoin de grossissement**.

La qualité de fabrication de la monture et des verres, procure une paire de **lunettes légère** et discrète. De plus grâce à ces lunettes loupe MAXI TV+ **sans monture métallique et en matière plastique** opaque, le champ de vision est optimisé, agrandi et votre vision n'est pas entravée, même sur les bords.

Vous êtes vraiment plongé dans l'image !

Les lunettes loupe MAXI TV+ s'utilisent à la place des lunettes de vue, pour des personnes faiblement malvoyantes atteintes de **DMLA légère ou de basse vision**. Grâce au facteur de rapprochement de 2X environ, l'écran vous semble plus proche. Dans la rue également, la lecture d'enseignes ou de panneaux devient possible avec moins d'efforts.

Note: Dans le cas de corrections très importantes (moins de 1,5 Dpt ou plus de 6 Dpt), spécifiques ou multiples, il se peut que les lunettes loupe n'apportent pas le bénéfice escompté.

D'autres [lunettes loupes](#) complètent l'offre dans pour d'autres usages:

- Pour voir de près, choisissez les [lunettes loupes Focus](#) (env. de 20 cm à 50 cm)
- Pour regarder uniquement télévision, vous pouvez utiliser les [lunettes MAX TV](#) (env. de 1,5m à 4m)



CARACTÉRISTIQUES DES LUNETTES LOUPE MAXI TV PLUS

- Monture sans bord
- Grossissement 3 x
- Distance d'utilisation à partir de 2 m

Lunettes Loupe MAXI TV+

- Distance inter-pupillaire supportée de 60 à 68 mm
- Ajustage des dioptries -1,5 à +6 Dpt par un réglage indépendant droite et gauche,
- La correction des cylindres n'est pas possible.
- Très légères : 46 g

À quoi servent les lunettes loupe MAXI TV+ ?

Elles permettent de grossir les images avec un facteur de rapprochement de 2,4x, optimisées pour l'accommodation entre 2 et 20 mètres, idéal pour la télévision, le cinéma, les spectacles, ou les musées.

Comment régler les lunettes loupe MAXI TV+ ?

Chaque œil peut être réglé indépendamment avec une molette de -1,5 à +6 dioptries pour compenser les défauts de réfraction. Cela offre un ajustement précis selon les besoins de chaque utilisateur.

Les lunettes loupe MAXI TV+ conviennent-elles à tous les malvoyants ?

Elles conviennent à de nombreuses personnes malvoyantes ayant un **besoin faible de grossissement** (presbytie, faible DMLA,) . Pour des corrections très importantes ou spécifiques, un essai préalable est recommandé.

Les lunettes loupe MAXI TV+ sont-elles légères et confortables ?

Oui, elles sont légères et discrètes, avec une monture sans bord pour un champ de vision optimisé. Elles pèsent environ 46 grammes, ce qui les rend confortables à porter.

Les lunettes loupe MAXI TV+ remplacent-elles les lunettes de vue ? Elles peuvent être utilisées à la place des lunettes de vue pour les malvoyants atteints de DMLA ou de basse vision. Cependant, elles ne corrigent pas les cylindres ou d'autres problèmes oculaires spécifiques ([visiole](#)).



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr