



# E-Bot adv

## Guide d'utilisation

## Résumé des commandes




4 rue Leon Blum, ZAE les Glaises  
91120 Palaiseau

01 69 19 14 60  
[info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr) [www.visiole.fr](http://www.visiole.fr)


# Mise en Oeuvre de E-Bot adv

## Pour DEPLIER

1- Appuyez sur le bouton

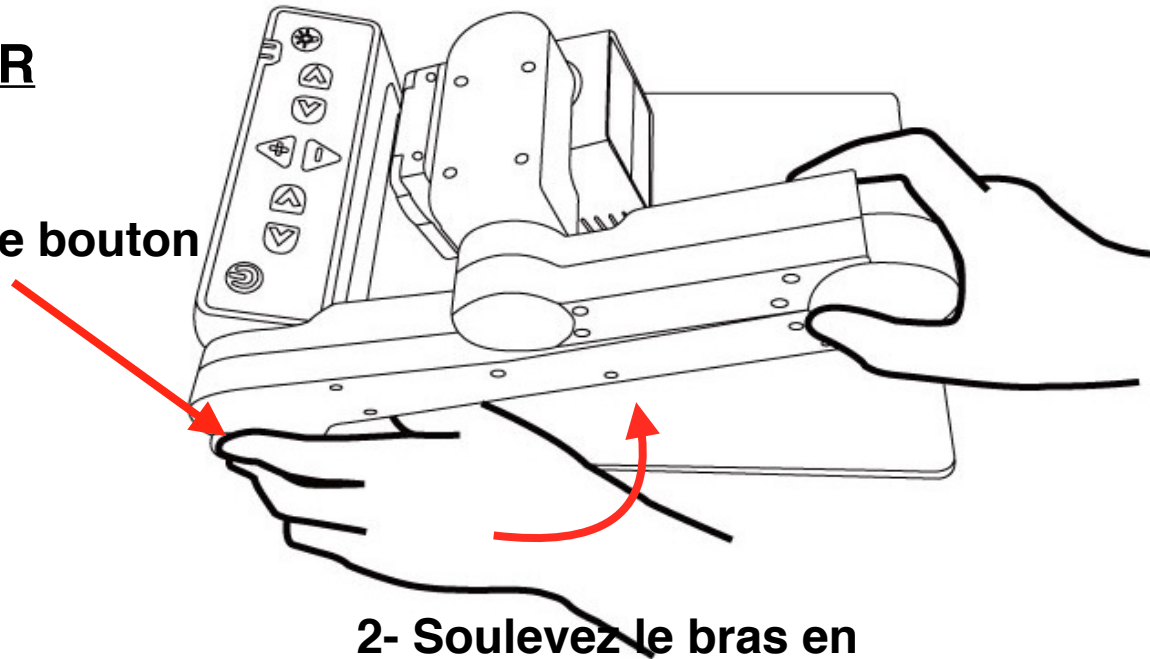

2- Soulevez le bras en maintenant le bouton appuyé

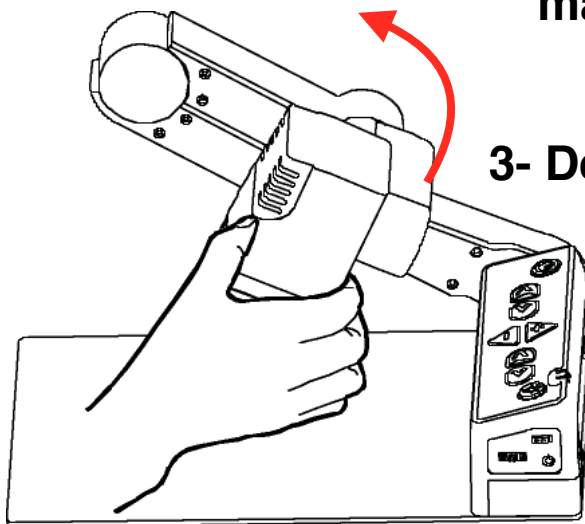


3- Dépliez la caméra


## Pour REPLIER

APPUYEZ sur le bouton de verrouillage


et descendez le bras

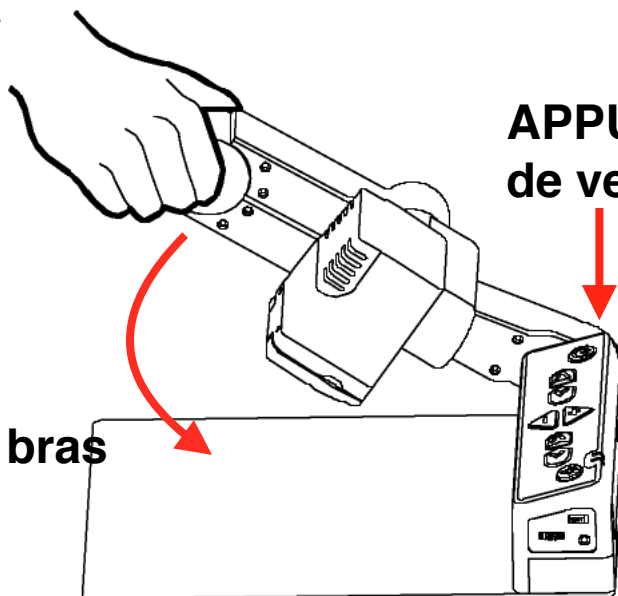


# La Batterie

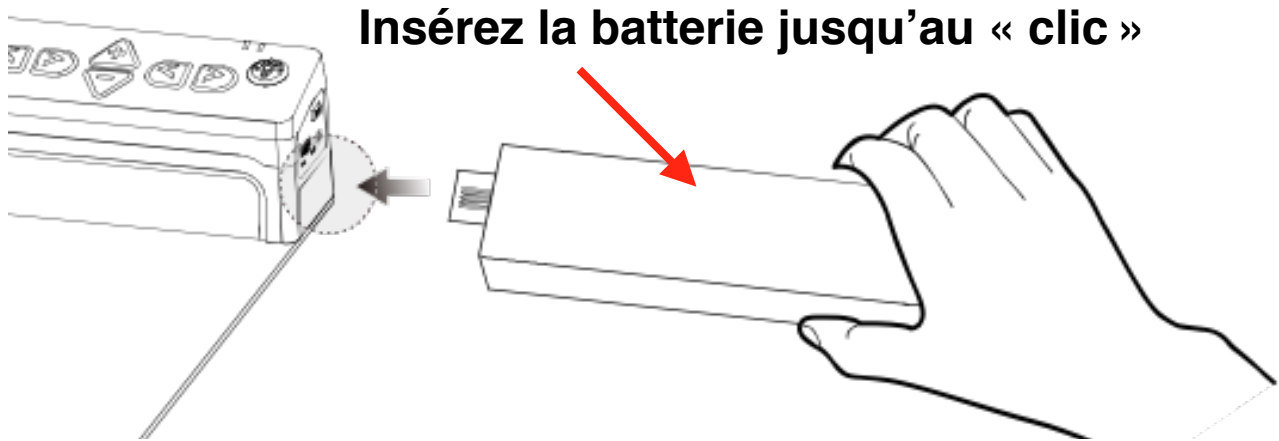

**Pour retirer la batterie, soulever le loquet de verrouillage**

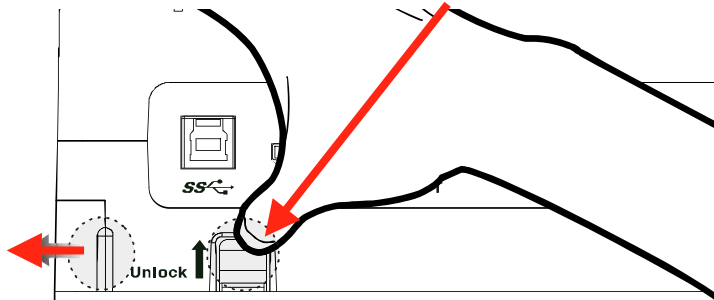


## Charge

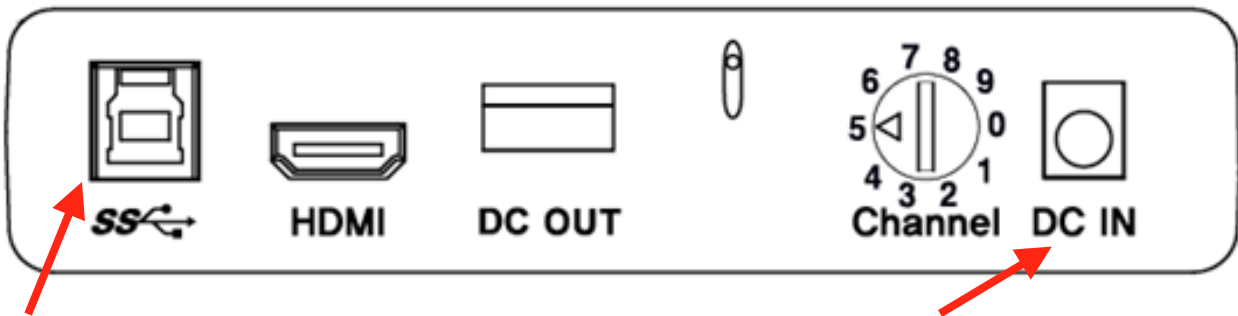

**USB : Charge si E-Bot éteint en plusieurs heures**

**Prise de charge : max 5 h**

**Voyant de charge :**  
- Rouge : en charge  
- Vert : chargé (lorsque E-bot allumé, sinon éteint)

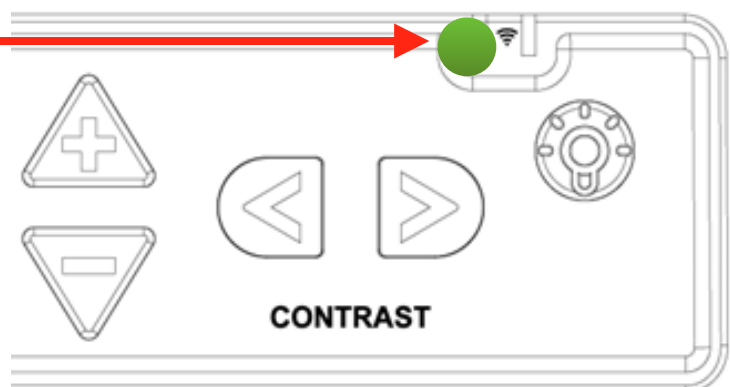


# Multi-Connectivité

## Téléviseur et Ecran informatique

- HDMI
- DVI (adaptateur HDMI / DVI livré)

## Moniteur portable:

- HDMI et alimentation par le port USB DC OUT

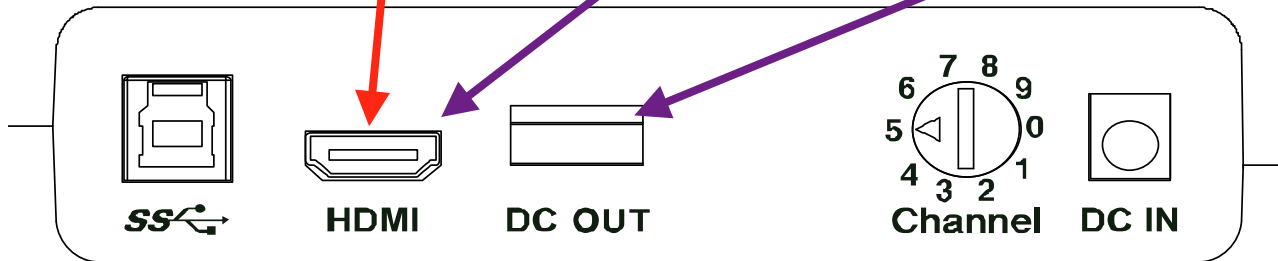


## PC ou MAC:

- Coté ordinateur
- WIFI



Allumer le WIFI

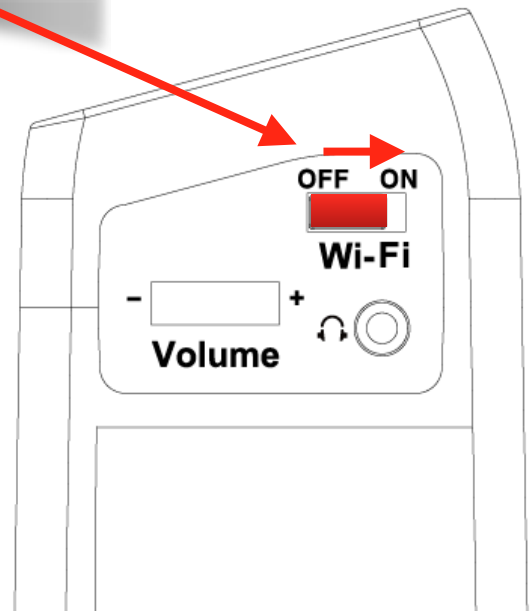

## Coté PC ou MAC ou Tablette

Choisissez le réseau


WIFI "E-bot-00xxx "

Mot de passe 00000000

(modifiable dans le menu du E-Bot)

Note : l'utilisation d'internet en Wifi sur le PC ne peut pas avoir lieu en même temps que l'utilisation du E-Bot

Voyant bleu = OK

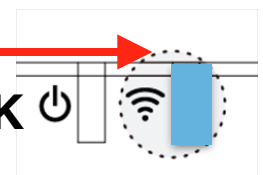

# Panneau de Contrôle

## Marche / Arrêt

Appui bref : Marche

Appui bref : Mise en veille

Appui plus de 3 s : Arrêt total


Note: depuis la veille, le temps de mise en marche est court.

Note: le E-Bot s'arrête automatiquement lors du pliage

Localisateur

Zoom

Ajustement contraste

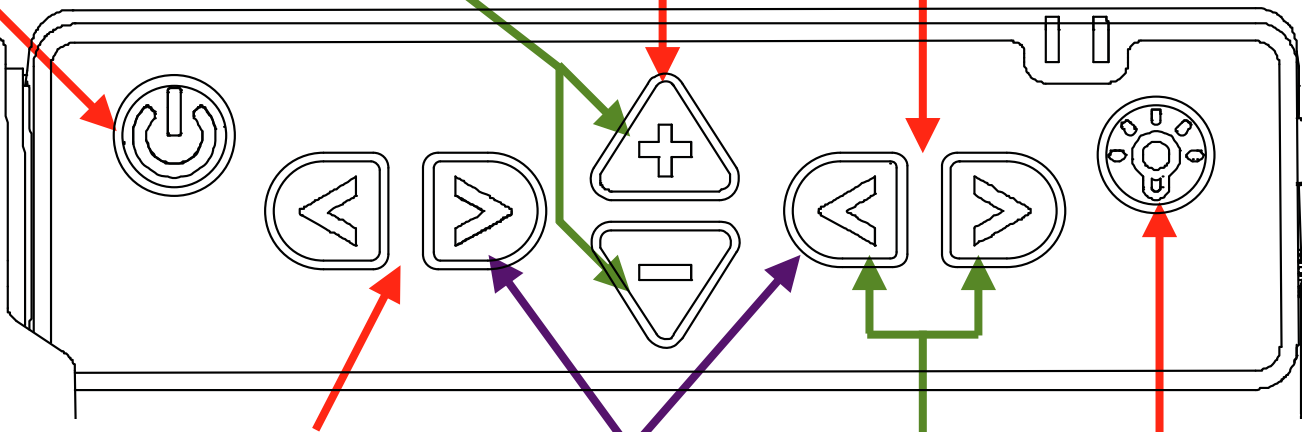

Mode couleur

Information:

- niveau de batterie
- Identifiant WIFI
- ...


Autofocus :  
Activé (par défaut)

Désactivé



Eclairage

## Audio


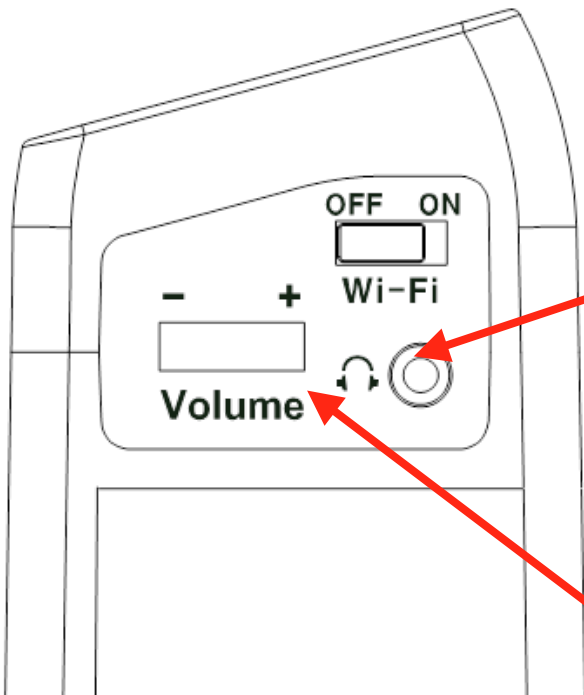


Prise pour casque ou écouteurs.

Note : les écouteurs avec micro ne sont pas acceptés.


Réglage du volume

# Télécommande

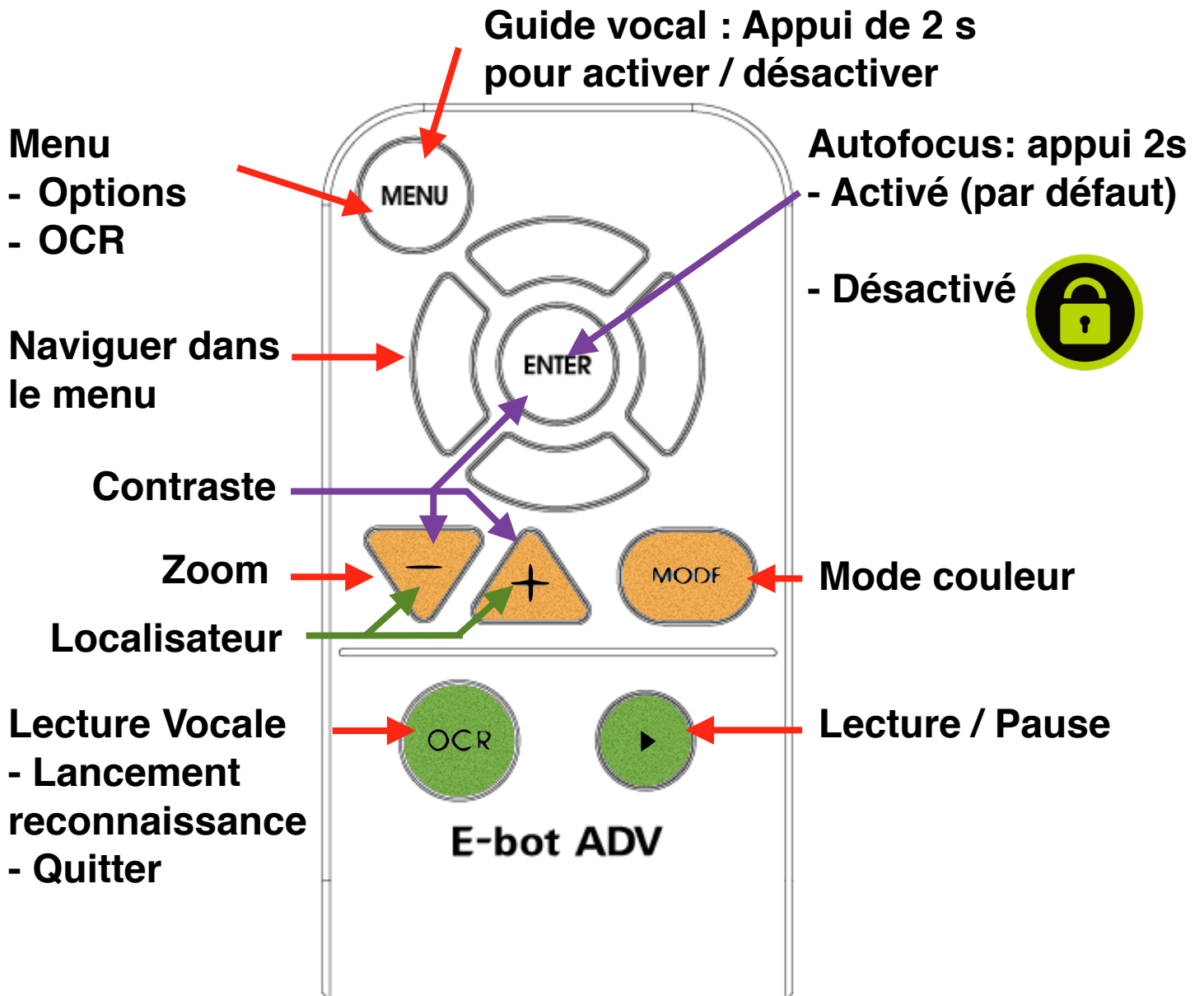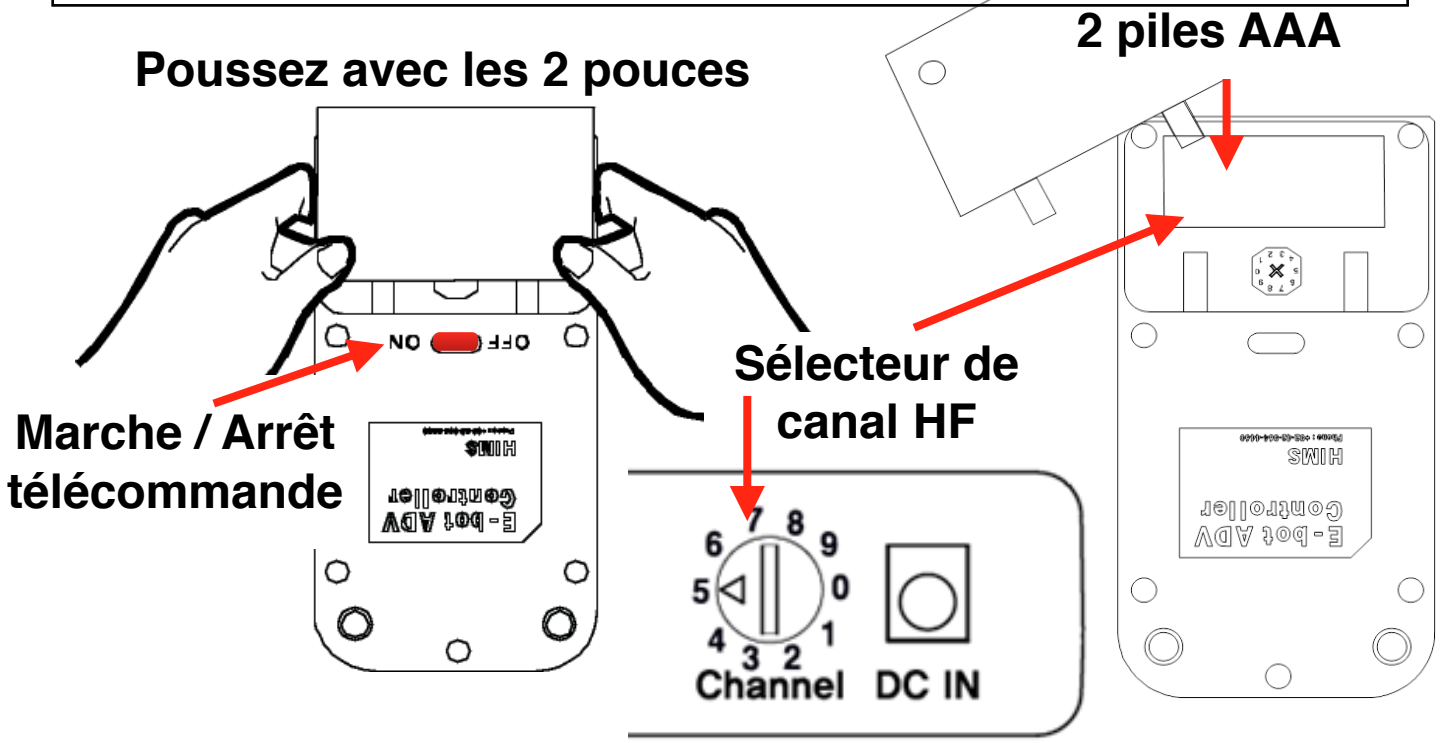


# Vision de près / Vision de loin

**Basculer la lentille et  
tourner la caméra**

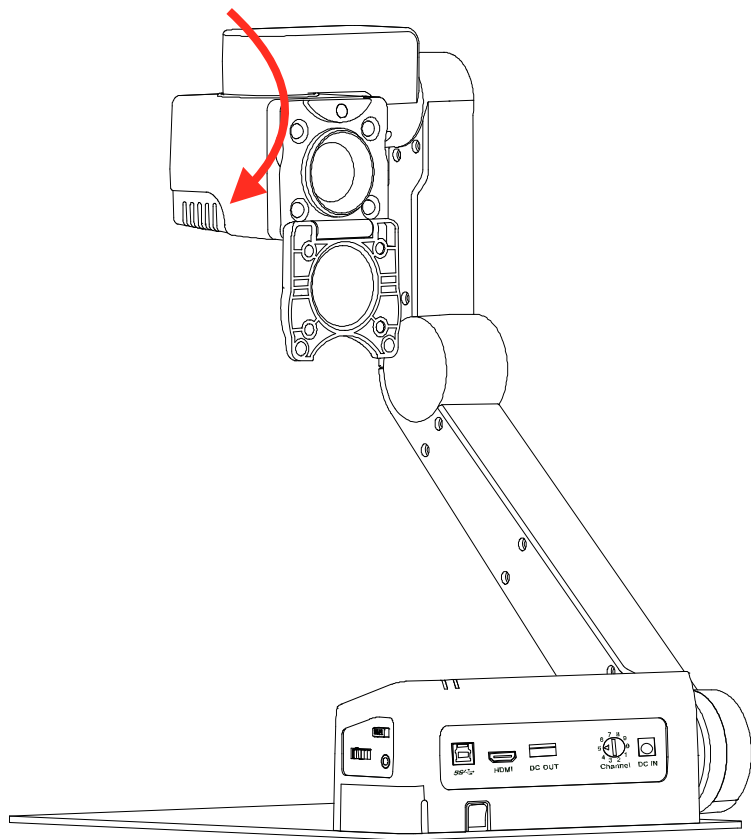

**Vision de loin**

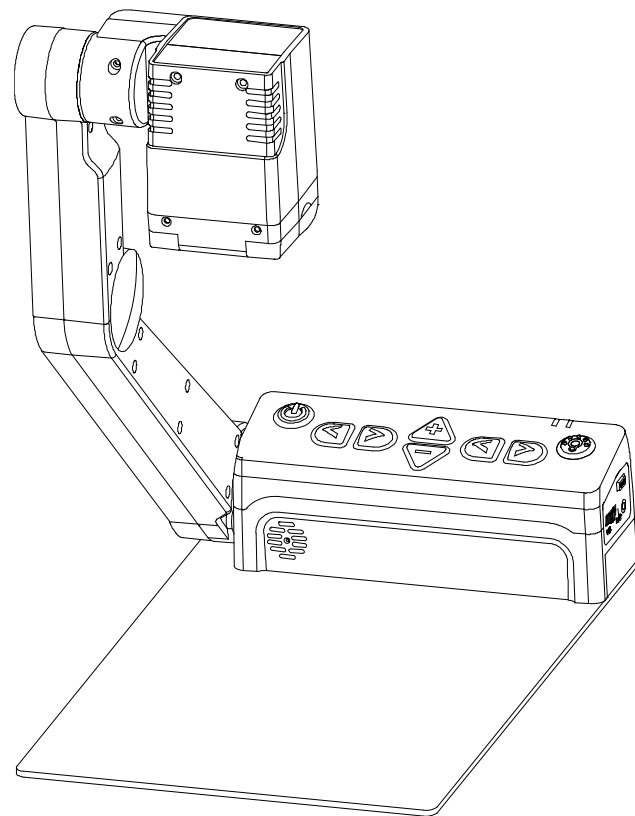


**Vision de Près**

# Menu Option

Le menu est accessible à partir de :

## Télécommande

**Menu**  
- Options  
- OCR

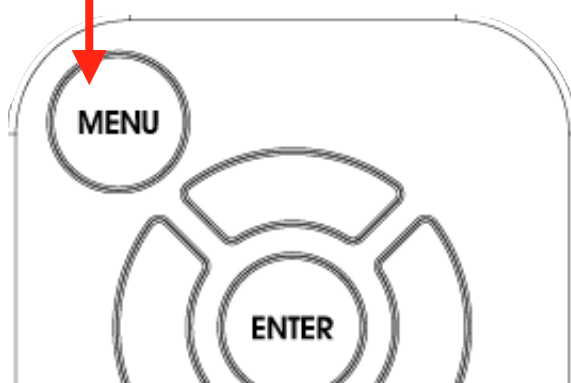

## Tablette


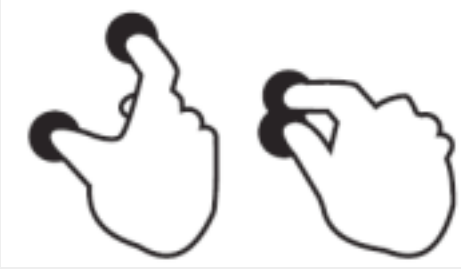


Menu	Ouvrir	 Glisser un doigt à partir du bord gauche
	Fermer	 Glisser un doigt à partir du bord droit

## PC ou MAC


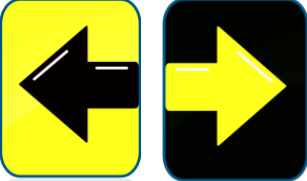






Menu	Ouvrir	Ctrl +M	Click droit
	fermer menu	Echap ou Retour arrière	Click gauche



# Utilisation sur Tablette

Fonctions		Gestes pour Tablette
Augmenter le grossissement		 Ecarter deux doigts
Réduire le grossissement		 Resserrer deux doigts
Menu Option	Ouvrir	 Glisser un doigt à partir du bord gauche
	Fermer	 Glisser un doigt à partir du bord droit



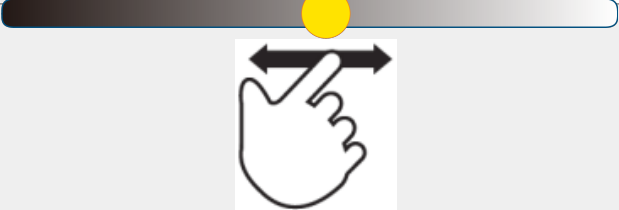



# Utilisation sur Tablette (suite)

<p><b>Menu</b> <b>Fonction</b></p>	<p>Faire apparaître</p>	 <p>Glisser un doigt à partir du bord droit</p>
	<p>Mode couleur</p>	
	<p>Démarrer lecture vocale</p>	
	<p>Arrêt lecture vocale</p>	
	<p>Autofocus désactivé</p>	
	<p>Focus fixe désactivé = Autofocus</p>	
	<p>Contraste</p>	 <p>Faire glisser un doigt</p>
<p>Quitter</p>		 <p>Glisser un doigt à partir du bord gauche</p>



Un doigt sur l'icône

# Utilisation sur Tablette (suite)

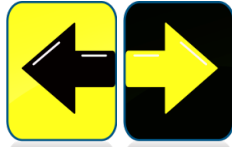Lecture vocale	Play/Pause	 Taper un doigt
	Se déplacer d'une phrase	 Glisser un doigt à droite ou à gauche
	Se déplacer d'un paragraphe	 Glisser un doigt vers le haut ou le bas
	Mode lecture vocale <-> mode vidéo-agrandisseur	 Double tape de 2 doigts
	Choix mode couleur	
	Contraste	 Faire glisser un doigt

# Utilisation sur PC et MAC

Fonction		PC	
		Clavier	Souris
Augmenter le grossissement		+	molette vers le haut
Diminuer le grossissement		-	molette vers le bas
Localisateur		Ctrl + F	-
Mode couleur suivant		M	Click gauche
Mode couleur précédent		Maj + M	-
Changement couleur rapide		N	-
Augmenter contraste		C	-
Diminuer contraste		Maj + C	-
Autofocus		Ctrl + I	-
Vitesse Voix	Plus rapide	[	
	Plus lent	]	
Lecture vocale ( OCR )	lancer	O	Click molette
	Lecture / Pause	Espace	-
	Phrase suivante	Flèche droite	-
	Phrase précédente	Flèche gauche	-
	Paragraphe suivant	Flèche basse	-
	Paragraphe précédent	Flèche haute	-
	Quitter	Echap	-
	Ouvrir menu	(en mode OCR) Ctrl+M	Click droit
Mode lecture vocale ↔ Mode vidéo agrandisseur	Ctrl+P	-	
Menu	Ouvrir	Ctrl + M	Click droit
	Déplacement entre tab	Flèche Droite ou gauche	Click gauche
	Déplacement entre item	Flèche haute ou basse	
	Choisir ; Valider	Validation ou Entrée	
	Annuler ; fermer menu	Echap ou Retour arrière	Click gauche
Quitter Programme		Alt + F4	

# Configuration recommandée

**Ordinateur : Port USB 3.0**

**PC : CPU : i5 ; RAM : 4 Go**

**Mémoire graphique : 1Go**

**Windows : XP, Vista, 7 ou 8**

**PC avec port USB 2.0 : image affichée en faible résolution**

**Mac OS : OS X Lion (10.7) ou supérieur**

**MAC avec port USB 2.0 : non supportés**

**Tablettes avec Windows RT : non supportées.**

