



E-Bot

Guide d'utilisation

Résumé des commandes




4 rue Leon Blum, ZAE les Glaises
91120 Palaiseau

01 69 19 14 60
info@visiole.fr www.visiole.fr


Mise en Oeuvre de E-Bot

Pour DEPLIER

1- Appuyez sur le bouton

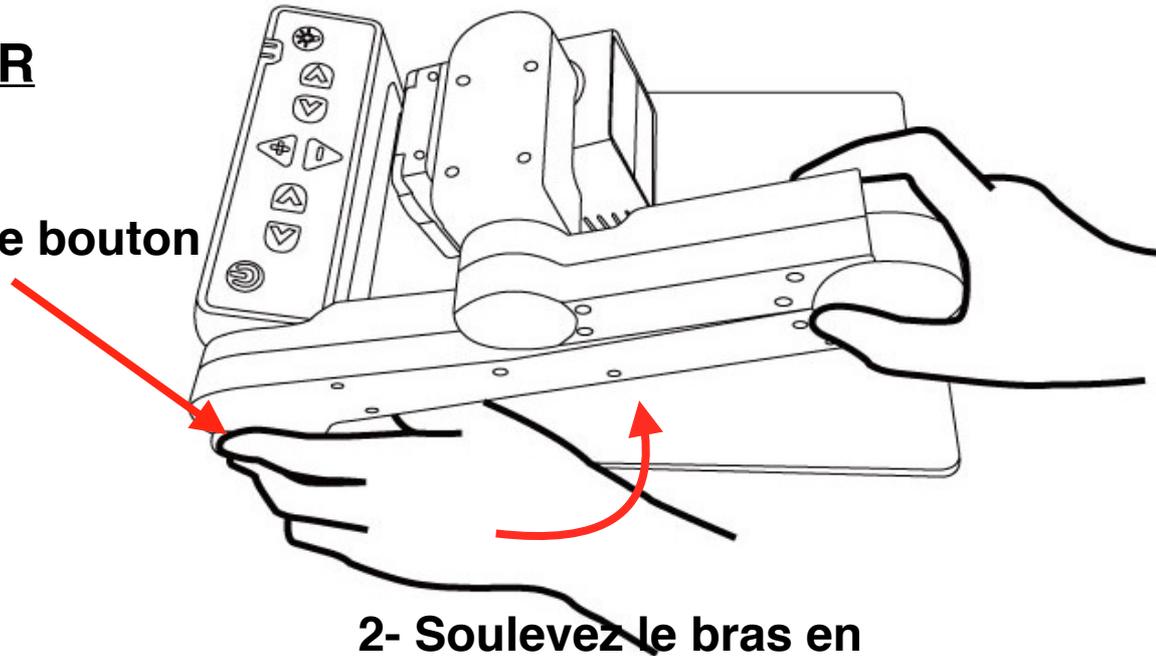

2- Soulevez le bras en maintenant le bouton appuyé

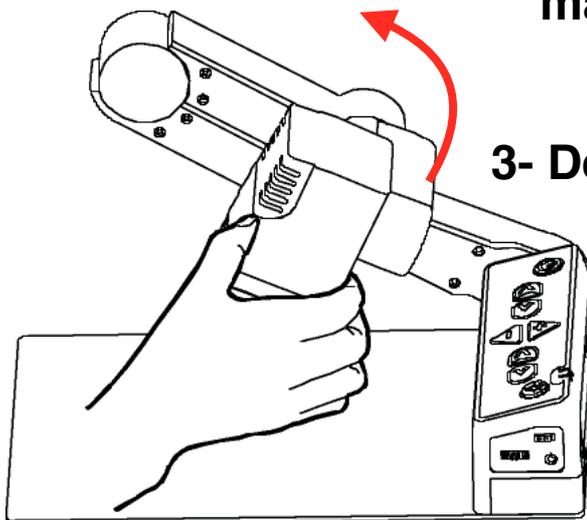


3- Dépliez la caméra


Pour REPLIER

APPUYEZ sur le bouton de verrouillage

et descendez le bras

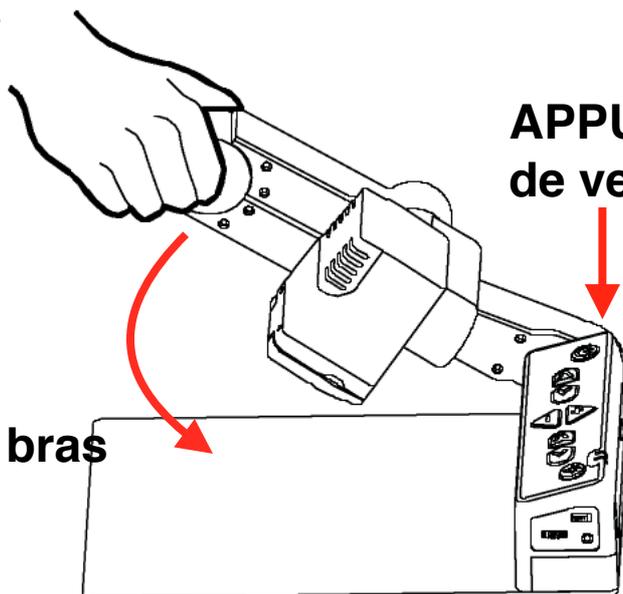


La Batterie

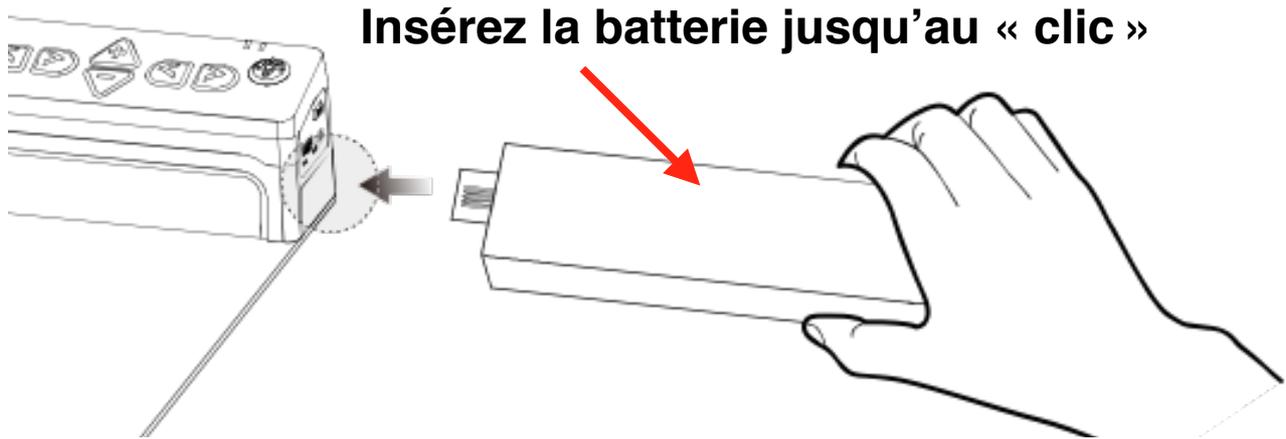

Pour retirer la batterie, soulever le loquet de verrouillage




Charge

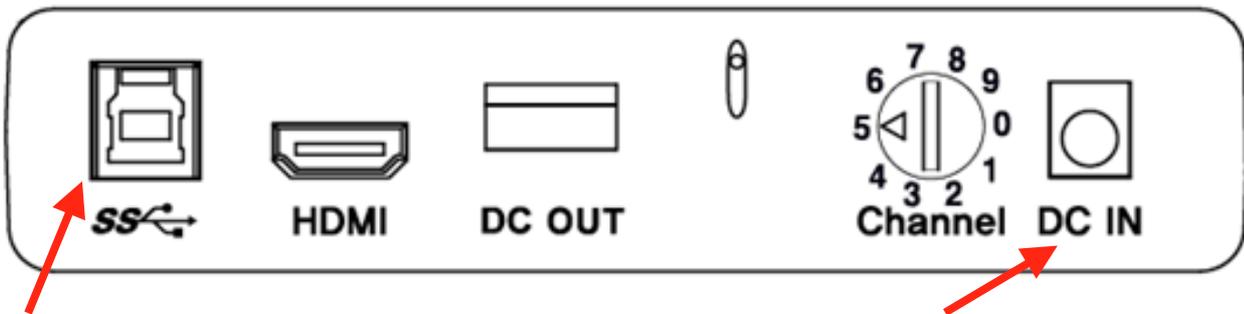

USB : Charge si E-Bot éteint en plusieurs heures

Prise de charge : max 5 h

Voyant de charge :
- Rouge : en charge
- Vert : chargé (lorsque E-bot allumé, sinon éteint)

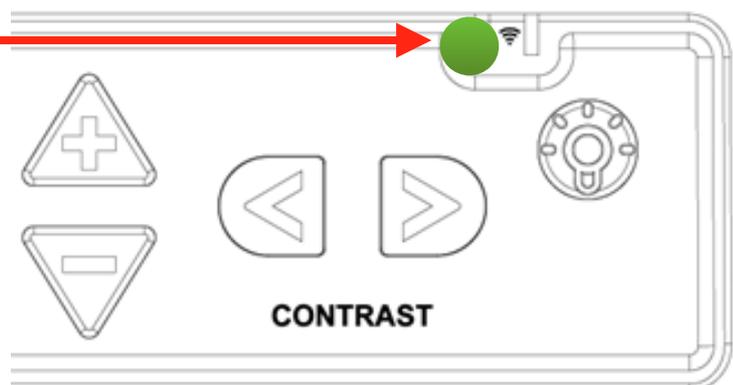


Multi-Connectivité

Téléviseur et Ecran informatique

- HDMI
- DVI (adaptateur HDMI / DVI livré)

Moniteur portable:

- HDMI et alimentation par le port USB DC OUT

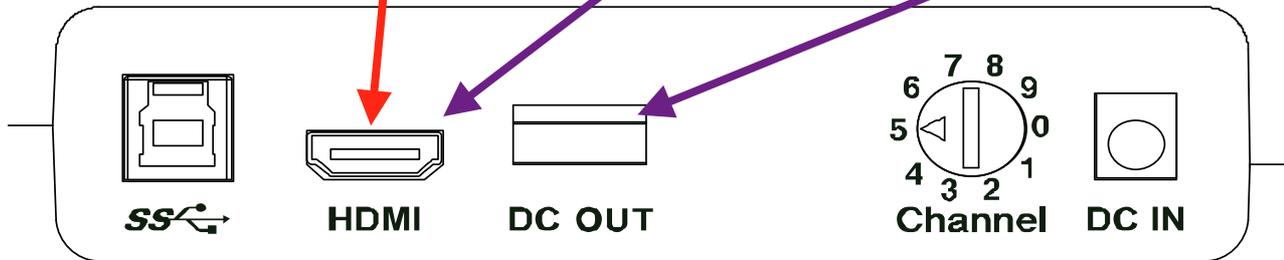


PC ou MAC:

- Coté ordinateur
- WIFI



Allumer le WIFI

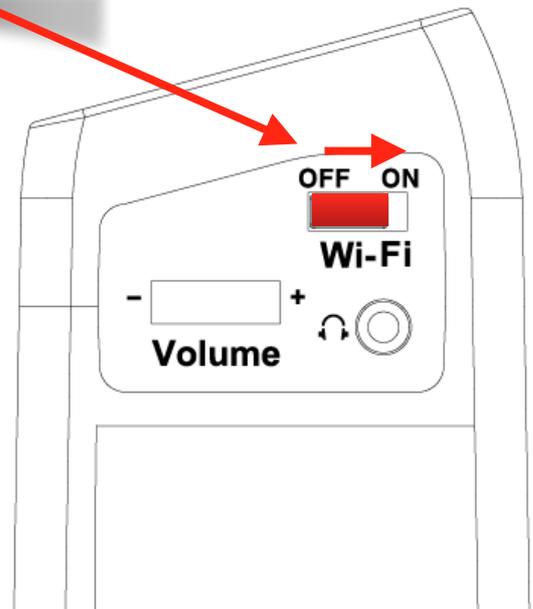

Coté PC ou MAC ou Tablette

Choisissez le réseau


WIFI "E-bot-00xxx "

Mot de passe 00000000

(modifiable dans le menu du E-Bot)

Note : l'utilisation d'internet en Wifi sur le PC ne peut pas avoir lieu en même temps que l'utilisation du E-Bot

Voyant bleu = OK

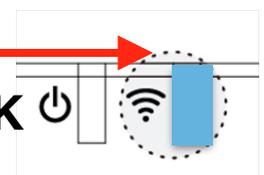

Panneau de Contrôle

Marche / Arrêt

Appui bref : Marche

Appui bref : Mise en veille

Appui plus de 3 s : Arrêt total


Note: depuis la veille, le temps de mise en marche est court.

Note: le E-Bot s'arrête automatiquement lors du pliage

Localisateur

Zoom

Ajustement contraste

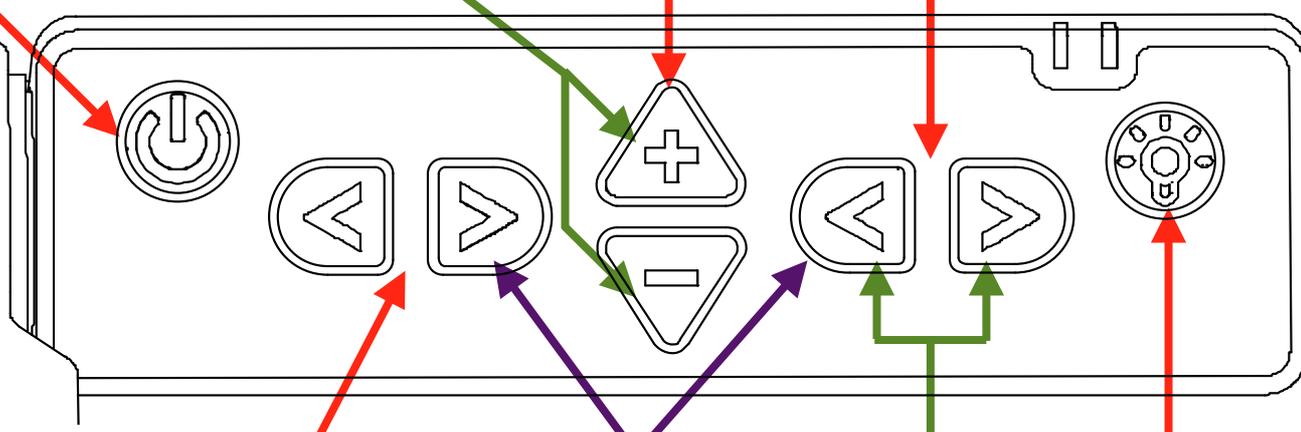

Mode couleur

Information:

- niveau de batterie
- Identifiant WIFI
- ...

Autofocus :
Activé (par défaut)


Désactivé




Eclairage

Vision de près / Vision de loin

**Basculer la lentille et
tourner la caméra**

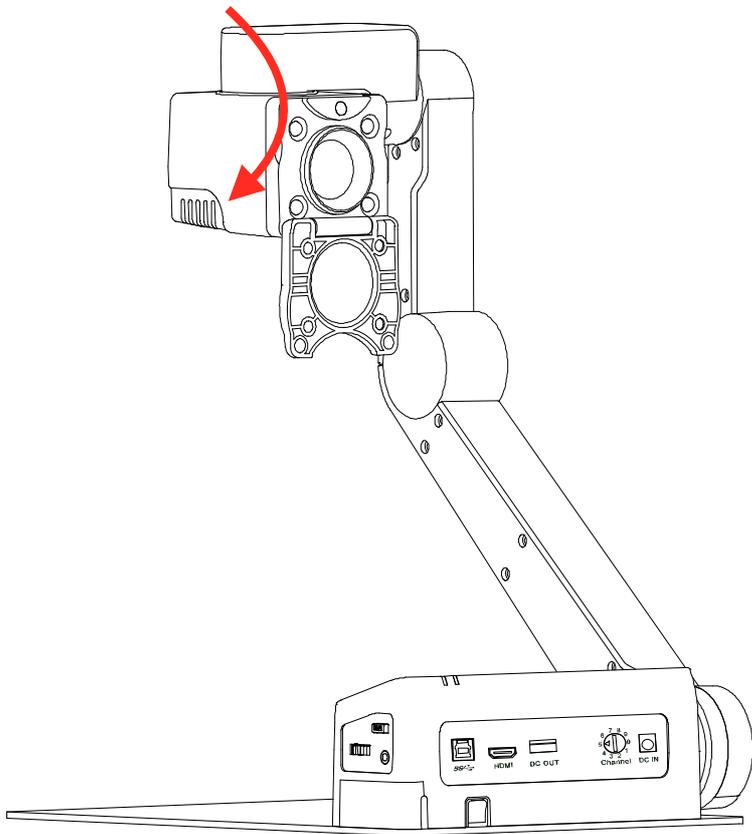

Vision de loin

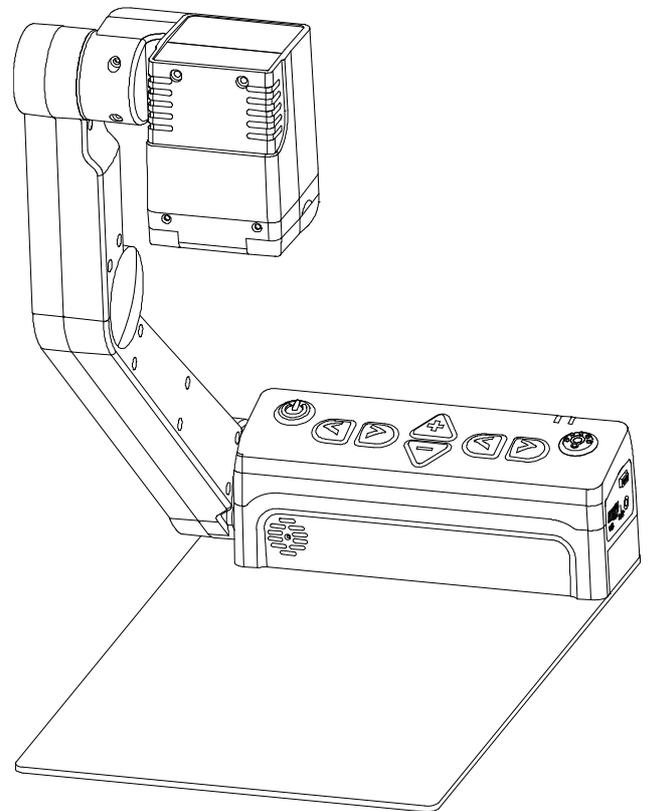

Vision de Près

Menu Option



Le menu est accessible à partir de :

Tablette

Menu	Ouvrir	 Glisser un doigt à partir du bord gauche
	Fermer	 Glisser un doigt à partir du bord droit



PC ou MAC

Menu	Ouvrir	Ctrl +M	Click droit
	fermer menu	Echap ou Retour arrière	Click gauche

Utilisation sur Tablette

Fonctions		Gestes pour Tablette
Augmenter le grossissement		 Ecarter deux doigts
Réduire le grossissement		 Resserrer deux doigts
Menu Option	Ouvrir	 Glisser un doigt à partir du bord gauche
	Fermer	 Glisser un doigt à partir du bord droit



Utilisation sur Tablette (suite)
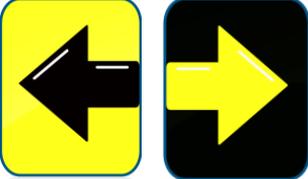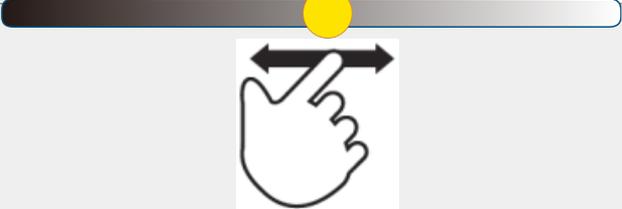
<p>Menu Fonction</p>	<p>Faire apparaître</p>	 <p>Glisser un doigt à partir du bord droit</p>
	<p>Mode couleur</p>	
	<p>Démarrer lecture vocale</p>	
	<p>Arrêt lecture vocale</p>	
	<p>Autofocus désactivé</p>	
	<p>Focus fixe désactivé = Autofocus</p>	
	<p>Contraste</p>	 <p>Faire glisser un doigt</p>
<p>Quitter</p>		 <p>Glisser un doigt à partir du bord gauche</p>



Un doigt sur l'icône

Utilisation sur Tablette (suite)

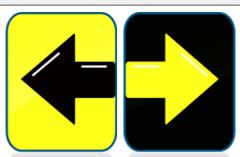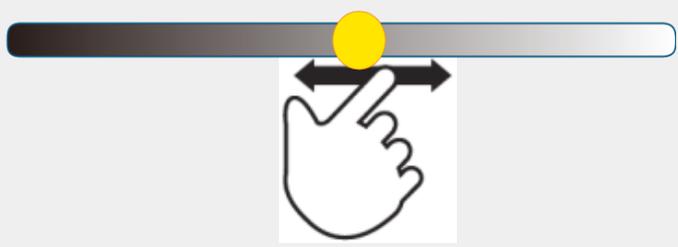Lecture vocale	Play/Pause	 Taper un doigt
	Se déplacer d'une phrase	 Glisser un doigt à droite ou à gauche
	Se déplacer d'un paragraphe	 Glisser un doigt vers le haut ou le bas
	Mode lecture vocale <-> mode vidéo-agrandisseur	 Double tape de 2 doigts
	Choix mode couleur	
	Contraste	 Faire glisser un doigt

Utilisation sur PC et MAC

Fonction		PC	
		Clavier	Souris
Augmenter le grossissement		+	molette vers le haut
Diminuer le grossissement		-	molette vers le bas
Localisateur		Ctrl + F	-
Mode couleur suivant		M	Click gauche
Mode couleur précédent		Maj + M	-
Changement couleur rapide		N	-
Augmenter contraste		C	-
Diminuer contraste		Maj + C	-
Autofocus		Ctrl + I	-
Vitesse Voix	Plus rapide	[
	Plus lent]	
Lecture vocale (OCR)	lancer	O	Click molette
	Lecture / Pause	Espace	-
	Phrase suivante	Flèche droite	-
	Phrase précédente	Flèche gauche	-
	Paragraphe suivant	Flèche basse	-
	Paragraphe précédent	Flèche haute	-
	Quitter	Echap	-
	Ouvrir menu	(en mode OCR) Ctrl+M	Click droit
Mode lecture vocale ↔ Mode vidéo agrandisseur	Ctrl+P	-	
Menu	Ouvrir	Ctrl + M	Click droit
	Déplacement entre tab	Flèche Droite ou gauche	Click gauche
	Déplacement entre item	Flèche haute ou basse	
	Choisir ; Valider	Validation ou Entrée	
	Annuler ; fermer menu	Echap ou Retour arrière	Click gauche
Quitter Programme		Alt + F4	

Configuration recommandée

Ordinateur : Port USB 3.0

PC : CPU : i5 ; RAM : 4 Go

Mémoire graphique : 1Go

Windows : XP, Vista, 7 ou 8

PC avec port USB 2.0 : image affichée en faible résolution

Mac OS : OS X Lion (10.7) ou supérieur

MAC avec port USB 2.0 : non supportés

Tablettes avec Windows RT : non supportées.

