

1 : Déplier le Mezzo

Puis ramener, sans forcer, l'écran face à vous.



2 : Connecter l'alimentation

Vous trouverez l'alimentation dans la barre cartonnée sur les mousses de l'emballage d'origine.

3 : Mise en marche

Mezzo sans Batterie



Eclairage

Marche / Arrêt

Mezzo avec Batterie



4 : Utilisation

Ajuster la position de l'écran

Placer un document

Frein du plateau



Mezzo

5 : Fonctionnalité des boutons

• Mode couleurs:

- Naturelles
- **Blanc / Noir**
- Noir / Blanc
- **Vert / Noir**
- **Jaune / Noir**
- **Jaune / Bleu**

• ZOOM : tourner pour + / -

• Autofocus: appui bref pour On/Off

• Localisateur: appui constant

• Paramétrage: appui long de 3 secondes

Conseil : le carton d'origine est le seul garant d'un transport 100 % sécurisé

• Contraste / luminosité : tourner

• Lignage / fenêtrage : Pousser puis tourner

