

1 : Déplier le Mezzo

Puis ramener, sans forcer, l'écran face à vous.



2 : Connecter l'alimentation

Vous trouverez l'alimentation dans la barre cartonnée sur les mousses de l'emballage d'origine.

3 : Mise en marche

Mezzo sans Batterie



Eclairage

Marche / Arrêt

Mezzo avec Batterie



4 : Utilisation

Ajuster la position de l'écran

Placer un document

Frein du plateau



Mezzo

5 : Fonctionnalité des boutons

Mode couleurs:

- Naturelles
- **Blanc / Noir**
- Noir / Blanc
- **Vert / Noir**
- **Jaune / Noir**
- **Jaune / Bleu**

● **ZOOM** : tourner pour + / -

● **Autofocus**: appui bref pour On/Off

● **Localisateur**: appui constant

● **Paramétrage**: appui long de 3 secondes

● **Contraste / luminosité** : tourner

● **Lignage / fenêtrage** : Pousser puis tourner

